




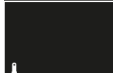






## Törkeotsing

Allolevas tabelis on kokkuvõtte kõigist veateadetest, mida ekraanil võidakse kuvada. See tabel võib aidata probleemi tuvastada. Siiski ei pruugi iga probleemi korral ekraanile veateadet ilmuda. Seadme vale kasutamine võib põhjustada ebatäpse tulemuse, isegi kui sümbolit ega veateadet ei kuvata.

Veateade	Põhjus	Mida teha?
E01 	Süsteemi viga.	Võtke ühendust meie volitatud edasimüüjaga.
E02 	Testriba on kasutatud või kahjustatud.	1. Võtke uus testriba. 2. Kui veateade püsib, võtke ühendust meie volitatud edasimüüjaga.
E03 	Sisestati vale testriba.	Võtke ühendust meie volitatud edasimüüjaga.
Aku sümbol 	Kui näete seda sümbolit, siis on aku tühjenemas.	1. Võite seadet edasi kasutada, testitulemused on endiselt täpsed. 2. Soovitatav on aku vahetada.
Lo koos aku sümboliga 	Kui näete seda sümbolit koos tähisega „Lo“, siis tähendab see, et aku tuleb vahetada.	1. Seadet ei saa kasutada. Seade lülitub automaatselt välja. 2. Vahetage aku.
Temperatuuri sümbol 	Ümbritsev temperatuur on testi jaoks liiga madal või liiga kõrge.	Asetage seade ja testriba kohta, kus keskkonnamtemperatuur on 10 °C ja 40 °C vahel. Oodake 20 minutit ja proovige uuesti. Kasutage uut testriba.

Lo koos temperatuuri sümboliga 	Ümbritsev temperatuur on liiga madal. Seade lülitub automaatselt välja.	Asetage seade ja testriba kohta, kus keskkonnamtemperatuur on 10 °C ja 40 °C vahel. Oodake 20 minutit ja proovige uuesti. Kasutage uut testriba. Kui veateade püsib, võtke ühendust meie volitatud edasimüüjaga.
Hi koos temperatuuri sümboliga 	Ümbritsev temperatuur on liiga kõrge. Seade lülitub automaatselt välja.	Asetage seade ja testriba kohta, kus keskkonnamtemperatuur on 10 °C ja 40 °C vahel. Oodake 20 minutit ja proovige uuesti. Kasutage uut testriba. Kui veateade püsib, võtke ühendust meie volitatud edasimüüjaga.
Hi koos vere sümboliga 	Vere ketoonisaldus võib olla süsteemi jaoks liiga suur (> 8,0 mmol/l). VÕI on probleem testribas.	1. Proovige uuesti ja võtke uus testriba. 2. Kui veateade püsib, võtke viivitamata ühendust oma loomaarstiga.
E10 	Koodikaart on kahjustatud või kasutatakse vale koodikaarti.	Võtke ühendust meie volitatud edasimüüjaga.

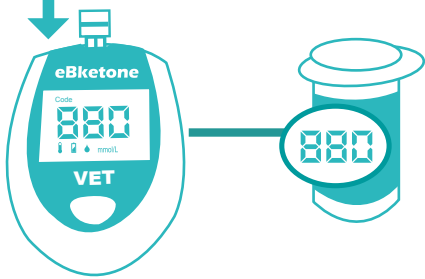
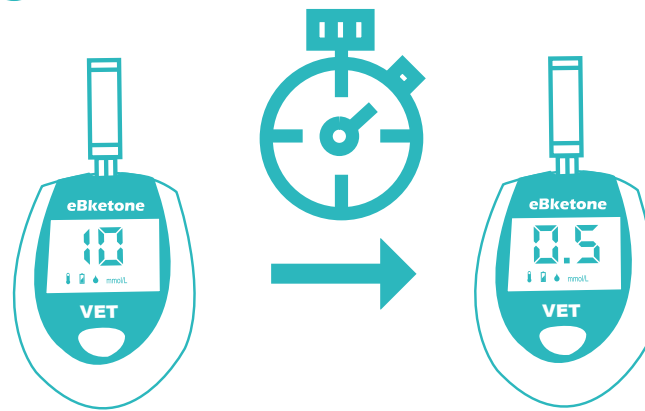


# eBketone

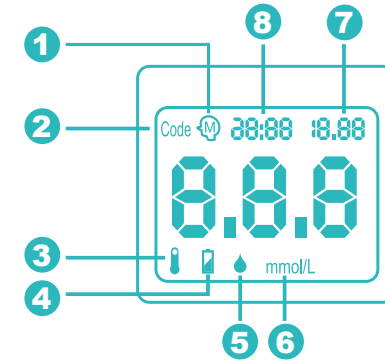
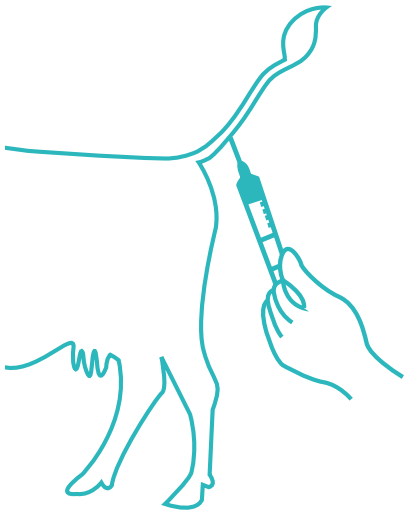


## Lihtne kasutusjuhend



**1****Koodikaart****Testriba****4****10 sekundit****Ekraan**

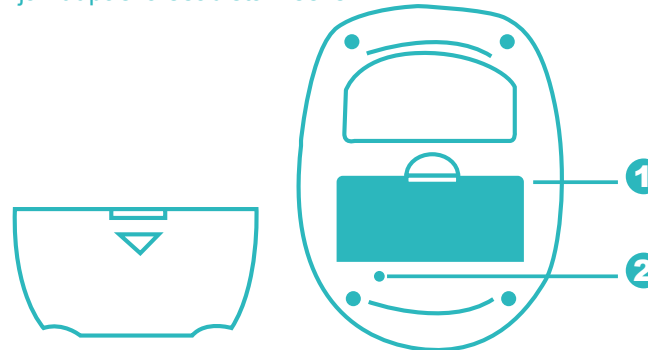
1. Mälu sümbol
2. Koodi sümbol
3. Termograaf
4. Aku sümbol
5. Veretilga sümbol
6. Mõõtühik
7. Kuupäev
8. Kellaeg

**2****Teave eBketone'i vere ketoonisalduse jälgimissüsteemi kohta****Seadme esikülj**

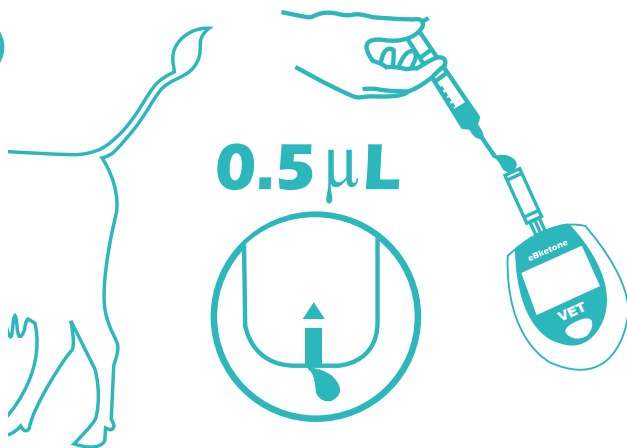
1. Testriba pesa: testriba ja koodikaardi sisestamiseks.
2. Ekraan: näitab testi tulemust, vere ketoonisaldust, testi-tulemus salvestatakse seadme mälu.
3. Nupp: mälust tulemuste kuvamiseks või seadistus-režiimis väärtuste kohandamiseks.

**Seadme tagakülj**

1. Akupesa: sisestage kaks AAA patareid.
2. Kella reguleerimisnupp: vajutage kellaaja ja kuupäeva seadistamiseks.

**Testriba**

1. Ülemine ots: kandke siia täisvere proov.
2. Seadmega ühenduv ots: sisestage seadmesse.
3. Tähis: veenduge, et verd oleks kogu reaktsiooniala täitmiseks piisavalt.

**3****Tootja:**

Visgeneer Inc.  
No. 335, Sec. 6, Zhonghua Rd.,  
Xiangshan Dist,  
Hsinchu City 30094, Taiwan

**Täiendav informatsioon:**

OÜ Zoovetvaru  
Uusaru 5  
Saue 76505  
Klienditugi: 800 9000

Ver.2  
1320512

